

LEAVE ME ALONE PLUGS

Vi ringraziamo per aver acquistato i nostri tappi originali. Riteniamo che i tappi per le orecchie, oltre a garantire un isolamento acustico eccellente, possano anche avere un aspetto unico e irripetibile. Ispirati dai frequenti viaggi e dalla vita in un ambiente affollato e rumoroso, abbiamo creato tappi in grado di proteggere il Tuo udito, la tranquillità e il Tuo spazio personale.

APPLICAZIONE



quando vuoi leggere, fare un pisolino o goderti un momento di silenzio



quando hai bisogno di un attimo di calma o hai problemi ad addormentarti in un ambiente rumoroso (per ragioni di comodità, potrà essere necessario rimuovere il logo)



quando devi concentrarti su attività che richiedono calma e attenzione



oltre ai parametri di isolamento acustico, i nostri tappi **riducono il rischio di dolori alle orecchie** durante il decollo e l'atterraggio




riduzione ideale del fruscio del vento durante la marcia (per ragioni di comodità, potrà essere necessario rimuovere il logo)

PROPRIETÀ

Realizzati in silicone morbido e ipoallergenico, adatto al lavaggio. Resistenti e riutilizzabili. Comodi anche in caso di utilizzo prolungato. Grazie alla particolare struttura, si adattano alla forma del Tuo canale auricolare. Riducono il rumore di 27 decibel (livello corrispondente a oltre il 30% del rumore udibile all'interno della cabina di un aereo di linea). Riducono il dolore alle orecchie provocato dagli sbalzi di pressione durante il decollo e l'atterraggio. Riducono efficacemente il fruscio del vento e il rumore durante i viaggi in moto o su altri mezzi veloci e rumorosi. Il piccolo contenitore in alluminio fornito in dotazione garantisce la pulizia e la sicurezza dei tappi durante il trasporto o quando non sono utilizzati.

ELEMENTI DEI TAPPI

I tappi sono composti da un logo in silicone rimovibile (1), dal filtro per la riduzione del rumore (2) e dall'estremità in silicone (3) da inserire nell'orecchio.


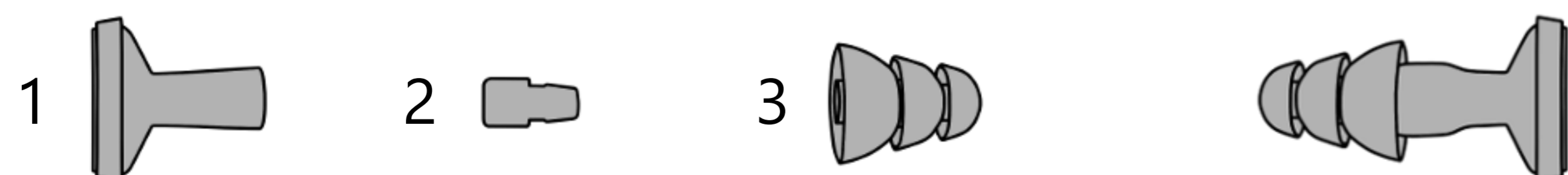


DIMENSIONE

I tappi sono prodotti in taglia unica per adulti. Le dimensioni corrispondono alle taglie M e L per le estremità degli auricolari canalari.

ADATTAMENTO

Nel tappo correttamente posizionato, il logo dovrà poggiare sull'orecchio. Qualora sporga all'esterno, sarà possibile accorciare l'elemento applicato al filtro (5 mm al massimo), in modo tale da ridurre la lunghezza dell'intero tappo.


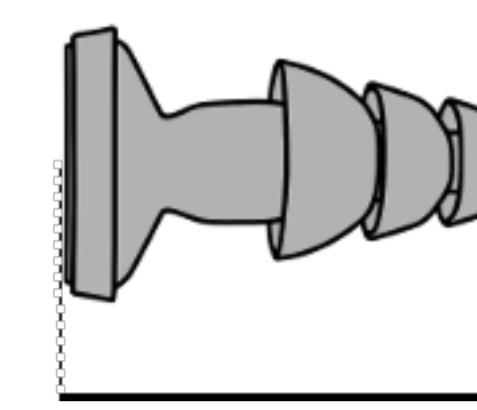
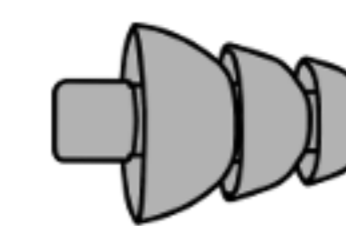


METODO D'USO

1. Tenere fermi i tappi con le dita (come in figura) e inserirli lentamente all'interno dell'orecchio.

2. Con un movimento rotatorio, spingere in avanti i tappi, in modo tale da farli posizionare correttamente.




3. Estrarre i tappi tirando il logo.

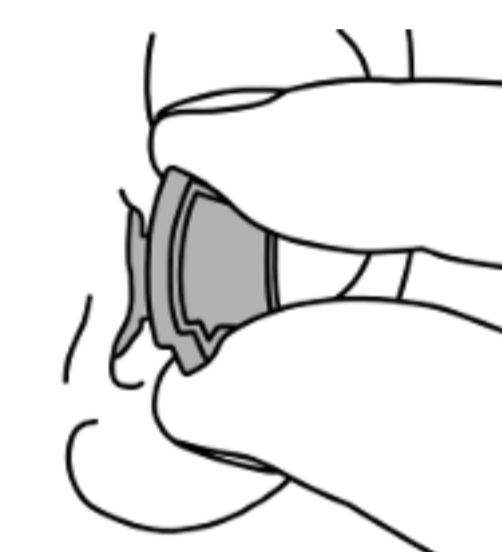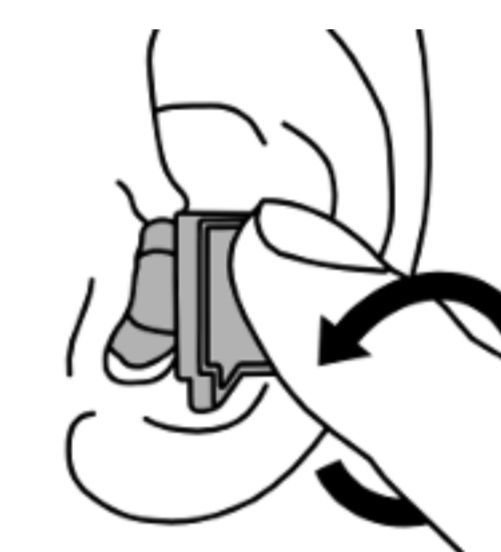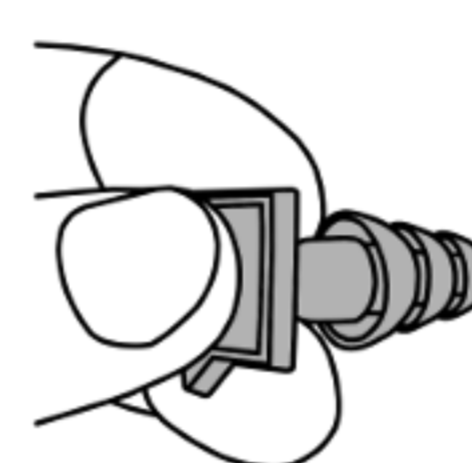

Procedura per rimuovere il logo (per ragioni di comodità o per l'uso in presenza del casco):

1. Tenere ferma l'estremità del tappo ed estrarre il logo premendolo con le dita in corrispondenza del filtro.

2. Per riposizionarlo, afferrarlo con le dita (vedi disegno) e inserirlo sul filtro. L'umidificazione con acqua degli elementi del filtro permetterà un'applicazione più facile.

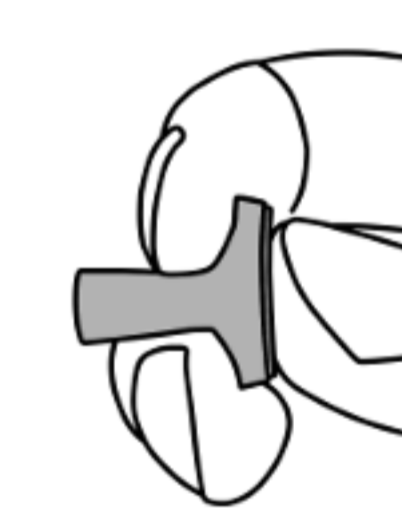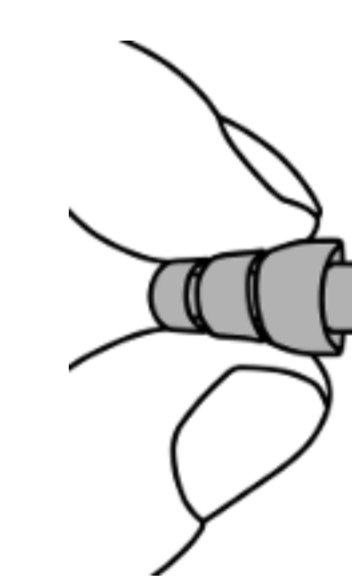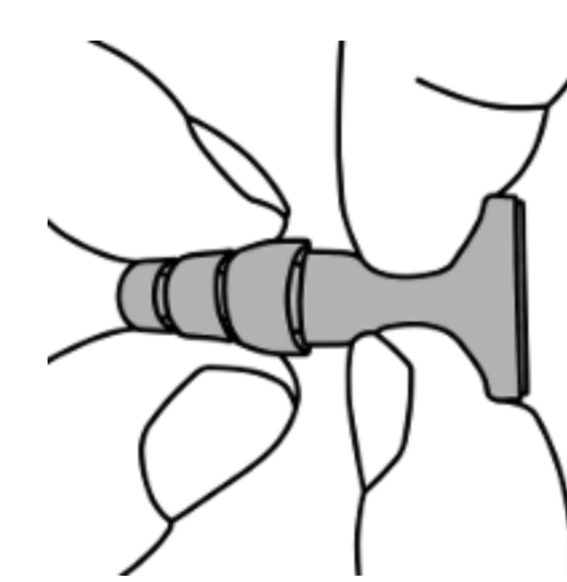

AVVERTENZA

Usare i tappi in modo conforme. Il prodotto è destinato all'applicazione auricolare per la riduzione del rumore. Qualsiasi altro utilizzo può provocarne il danneggiamento. Per mantenere la pulizia, conservare i tappi all'interno dell'apposito contenitore in alluminio. I tappi potranno essere lavati con acqua corrente e un detergente delicato. Lasciare asciugare i tappi prima di riutilizzarli. Tenere fuori dalla portata dei bambini (rischio di ingestione di piccoli elementi). Non usare i tappi per nuotare (non sono adatti a questo utilizzo e non galleggiano).

GARANZIA

URBAN PROJECT concede una garanzia di 30 mesi sui tappi. La garanzia non comprende il contenitore in alluminio.